



損金算入制度



住友理工

取得価額が
30万円未満の
少額減価償却資産は
確定申告書にて全額損金に計上できます。

口腔機能低下症の
咬合圧測定
130点

有床義歯咀嚼機能検査の
咬合圧測定
130点※

※咬合力測定のみを
実施した場合



全歯の測定に加え、個歯の測定も可能になりました
小児や口の小さな方の検査にも適しています

● ● ●
咬合力がその場でわかる
小児の咬合力測定にも

ポイント 1

リアルタイム表示

ディスプレイには、測定中の最大咬合力が表示されます。
即時フィードバックが可能です。

ポイント 2

軽量・ポータブル

乾電池式で、ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
訪問診療にも活用できます。

歯科用咬合力計
口腔機能モニター Oramo2

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度

ご存知のとおり、税制改正により、取得価額30万円未満の少額減価償却資産は、その年度中に取得価額全額を税金申告上損金に計上できます。従来は取得価額が10万円未満しか対象になりませんでしたが、特例により30万円未満の器械などに投資いただいても必要経費として処理できますので、結果として所得税を減少させ、税金負担を軽減することができます。この特例は2026年3月31日までの措置です。日頃、小器械などの導入を検討しておられる先生方の積極的なご利用をお勧めします。

※実際の申告に際しては一定の条件がございますので税理士様にご相談の上、お手続きください。

※「適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計金額が300万円まで」という上限が設けられています。


SHOFU INC.

使用方法

簡単 3 STEP



1st
STEP

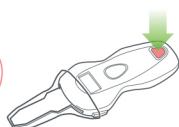

本体の電源を入れる

電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

2nd
STEP



患者の口腔内へセンサーを挿入

センサーシート(Uタイプ)は、挿入の際、湾曲させても問題ありません。

3rd
STEP



計測ボタンを押し、計測を開始

咬合力の最大値が表示されます。

製品仕様

■機器本体

名称	口腔機能モニター Oramo2
医療機器届出番号	23B2X10022000007
類別	機械器具 24 知覚検査または運動機能検査用器具
一般的名称	一般医療機器 歯科用咬合力計(JMDN コード70699000)
医療機器分類	クラスI 特定保守管理医療機器
測定内容	最大咬合力値
測定時間	約1秒～
表示範囲	Iタイプ:0～1300N Uタイプ:0～1999N (ただし計測精度保証範囲は100～500N)
測定精度	±10%(繰り返し性)
外形寸法	約245mm × 79mm × 40mm
本体重量	約160g(電池含む)
標準医院価格	240,000円



同梱物

- ・本体(1台)
- ・単4電池3本(1本予備付属)
- ・セミハードケース(1個)

センサーシート、センサーカバーは別売です

消耗品(別売)

(個歯用)



bf-センサーシート(Iタイプ)

入 数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0～1300N
精度保証範囲: 100～500N
標準医院価格: 21,000円

(全歯用)



bf-センサーシート(Uタイプ)

入 数: 1枚
最大使用回数: 50回
表示範囲: 0～1999N
精度保証範囲: 100～500N
標準医院価格: 21,000円



bf-カバー(Iタイプ)

入 数: 50袋
標準医院価格: 6,500円



bf-カバー(Uタイプ)

入 数: 50袋
標準医院価格: 6,500円

※小児に使用する場合は、Iタイプセンサーを利用し、第二乳臼歯または第一大臼歯の一对で測定してください。

※「Oramo」、「オラモ」および「Oramo」ロゴは住友理工株式会社の商標または登録商標です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2025年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

製造販売元

住友理工

〒485-8550 愛知県小牧市東三丁目1番地
TEL: (0568)77-2975 FAX: (0568)77-2976

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30～12:00 12:45～17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595